

医学的データを基につくられた
骨盤・股関節サポートインナー

**BALANCE SUPPORT
INNER SERIES** 日本製

URG

特許取得商品
特許第5081329号

骨盤・股関節サポート
ロングガードル
【ブラック】【ベージュ】

骨盤・股関節サポート
ショートガードル
【ブラック】【ベージュ】

ありそうでなかった本格ケアガードル!!
Dr.の理論をカタチにしたらこのようになりました。



(単位:cm)

サイズ	ウエスト	ヒップ
58	55 ~ 61	79 ~ 89
64	61 ~ 67	83 ~ 93
70	67 ~ 73	86 ~ 96
76	73 ~ 79	89 ~ 99

日本製
特許取得商品
特許第5081329号

URG



レック丈は太ももの途中で段になりにくい長め



**URG骨盤・股関節
サポートガードルの特長**

骨盤・股関節を安定させるベルトを一体化

ベルト状の当て布で仙腸骨と、股関節の両方を安定させ、歩きやすさをサポート。ヒップ下からお腹にかけて引き合うバランスで、ヒップアップと腰の反り返りを安定。

広めの当て布でしっかりとヒップケア

ヒップ下の当て布は、ベルト状にバランスをとって、引き合う力で太もものメリハリをつけ、しっかりとヒップアップ。

おなかもスッキリサポート

気になる下腹部は、横伸びを抑えることで、スッキリサポート。ヒップ上部からお腹にかけて引き合うバランスサポートで腰の反り返りを防止。

身生地は280dパワネットを使用

縦・横に伸び、動きにフィット。通気性がよく、全体をしっかり引き締めます。

裾は響きにくい縫い目のないヘム仕様



生地の伸び方向

スマートに魅せるレックサポート

レック丈は太ももの途中で段になりにくい長めの設計。裾は響きにくい縫い目の無いヘム仕様。

伸縮方向の異なる素材をあわせることで、よりサポート力を実感。

メインの身生地は縦・横に伸縮する素材を使用。当て布部分は一方方向のみに伸縮する素材を使用。

BALANCE SUPPORT INNER SERIES

医学的データを基につくられた骨盤・股関節サポートインナー

背骨・骨盤の専門家、Dr.オグラがプロデュースした健康と美をサポートするインナーシリーズ。バランスサポートインナーシリーズは、腰痛や肩こり、猫背といった背骨の問題を持つ多くの人々のために、そして様々なスポーツパフォーマンス向上のために、20年以上の臨床経験、国内及び海外での医学的研究データに基づき開発されました。また、本シリーズは日本人の骨格特徴に合わせ、姿勢美人・美男をサポートするためにも造られた新感覚インナーです。

開発

小倉 毅 (おぐら たけし)

医学博士 米国公認カイロプラクティックドクター

米国ライフウエストカイロプラクティック大学卒業
(ドクター・オブ・カイロプラクティック取得)

・東北大学大学院医学系研究科博士課程卒業 (医学博士取得)
・東北大学 サイクロトロンRセンター リサーチフェロー



ティエム通商株式会社

福井県福井市四ツ井1丁目20-12 TEL (0776) 60-2340
E-mail: tm-trading@voice.ocn.ne.jp FAX (0776) 60-2510

取扱店

医学博士 米国公認カイロプラクティックドクター プロデュース

医学的データを基につくられた骨盤・股関節サポートインナー

BALANCE SUPPORT INNER SERIES

URG

日本製

骨盤股関節 ベルト 【ブラック】

特許出願中

特願2012-256943

※写真はURGロングガードル（ブラック）の上に着用して撮影しました。ガードルは商品には含まれておりません。



ありそうでなかった本格ケア骨盤ベルト!!
Dr.の理論をカタチにしたらこのようになりました。



骨盤股関節ベルトの特長

骨盤・股関節を安定させるベルト

仙腸関節を股関節の両方を安定させ、歩きやすさをサポート。仙腸関節からお腹にかけて引き合うバランスで腰の反り返りを安定。

身生地は280dパワーネットを使用

縦・横に伸び、動きにフィット。通気性が良く、全体をしっかり引き締めます。

ボーンにより、腰を安定

腰の両サイドにボーンを入れることで、腰を支え、ベルトの形状を安定させます。

クッション付で、仙腸関節をやさしく保護

仙骨の形状と仙腸関節の位置に合わせた台形状のクッションの当て布でやさしく保護します。



着用方法

- ①仙腸関節部分（腰に手を当てた時に触れる左右対象に出ている骨）に台形の長い辺が上に来るようにクッションをあてます。
- ②腸骨（両手を腰側面に置いた時に触れる骨）と股関節の間を通っていることを確認して、前で留めます。

着用ポイント

肌着やズボン・スカートなどのアウターの上にお使い下さい。

※肌に直接着用するのはかゆみ・カブレなどの原因となりますので、必ず肌着等の上から着用して下さい。

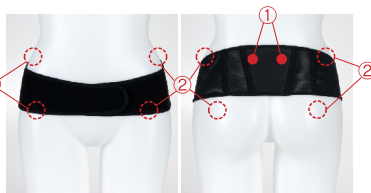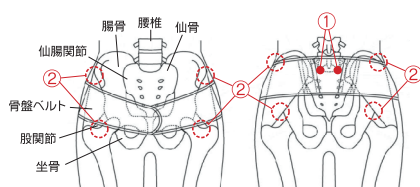

(単位:cm)

サイズ	ウエスト	ヒップ
M~L	64~82	87~98
L~LL	82~100	98~109

使用上の注意

- 就寝中のご着用は避け下さい。
- 病中、病後のご着用は避け下さい。
- 妊娠中や、体調不良時のご使用は避け下さい。
- ご着用時に皮膚に炎症や湿疹等の異常を感じた場合は、直ちに着用を中止して下さい。
- サイズが合わない製品は、無理がかかり体に害を与える恐れがありますので、着用しないで下さい。
- 下着として本来の目的以外の使用は避け下さい。

BALANCE SUPPORT INNER SERIES

医学的データを基につくられた骨盤・股関節サポートインナー

背骨・骨盤の専門家、Dr.オグラがプロデュースした健康と美をサポートするインナーシリーズ。バランスサポートインナーシリーズは、腰痛や肩こり、猫背といった背骨の問題を持つ多くの人々のために、そして様々なスポーツパフォーマンス向上のために、20年以上の臨床経験、国内及び海外での医学的研究データに基づき開発されました。また、本シリーズは日本人の骨格特徴に合わせ、姿勢美人・美男をサポートするためにも造られた新感覚インナーです。


開発

小倉 毅(おくら たけし)

医学博士 米国公認カイロプラクティックドクター

米国ライフウエストカイロプラクティック大学卒業
(ドクター・オブ・カイロプラクティック取得)

・東北大学大学院医学系研究科博士課程卒業(医学博士取得)
・東北大学 サイクロロンRIセンター リサーチフェロー

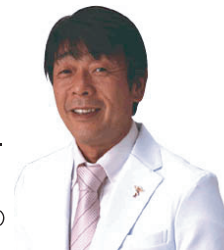

ティエム通商株式会社

福井県福井市四ツ井1丁目20-12 TEL (0776) 60-2340
E-mail:tm-trading@voice.ocn.ne.jp FAX (0776) 60-2510

取扱店